

# Fassisi CanDiro gyorsteszt

## Szívférgesség kimutatására

### Kimutatás szérumból és plazmából

Cseppentsen 1 csepp szérumot vagy plazmát a mintanyílásba a mellékelt pipettával. Várjon pár másodpercet, míg a minta teljesen abszorbeálódik.

Tegyen 2 csepp puffert a mintanyílásba. Ha a folyadék nem fut jól fel a csíkhöz másfél percen belül, adjon egy újabb csepp puffert hozzá.

Olvassa le az eredményt 5–10 percen belül.

### Kimutatás teljes vérből

Tegyen 1 csepp vért a tesztsőbe a mellékelt pipettával majd adjon hozzá 3 csepp puffert. Zárja be a csövet és gyengéden rázza meg. Nyissa ki és vegyen ki egy kis mintát a pipettával. Lassan helyezzen 2 csepp mintát a mintanyílásba (az első csepp után várjon pár másodpercet, amíg a csepp abszorbeálódik, majd adja hozzá a második cseppet)

Ha a folyadék nem fut jól fel a csíkhöz két percen belül, adjon egy újabb csepp puffert hozzá.

Olvassa le az eredményt 5–10 percen belül.

### Kiértékelés

Pozitív eredmény:

A teszt pozitív amikor a kontroll csík ( C ) és a teszt csík ( T ) is látható a reakciómezőben. *Dirofilaria immitis* antigéne jelenlétét mutatja a mintában. Ha csak halvány csík látszik a teszteredmény mindazonáltal pozitív. A piros csík intenzitása függ a mintában levő CHW antigén mennyiségtől.

### Negatív eredmény

A teszt negatív ha csak a kontroll csík ( C ) látható. A teszt negatív amikor csak a kontroll vonal látható a reakciómezőben. A mintában CHW antigén nem mutatható ki.

### Érvénytelen eredmény

A kontroll csík nem látható. A teszt nem lett megfelelően kivitelezve, a lejárati időn túl használták a tesztet vagy a tesztkazetta túl sokáig volt kitéve a levegőnek a lezáró fóliából kivéve. Ez esetben a tesztet egy új tesztkazettával kell elvégezni.

Figyelem: Az eredményt olvassa le a teszt megkezdését követő 10 percen belül. Ez idő után az eredményeket érvénytelennek kell tekinteni.

**FIGYELEM:** Az eredményt olvassa le a teszt megkezdését követő 10 percen belül. Ez idő után az eredményeket érvénytelennek kell tekinteni.

*Megjegyzés: Az eredményeket mindig az anamnézis és a klinikai körülmények figyelembe vételével kell elbírálni. Minden teljes vérből készült tesztet, melyek nem korrelálnak a klinikai képpel meg kell ismételni plazma vagy szérum mintával. Minden kétséges eredményt érdemes megismételni kb. 2 hét elteltével.*

### Tárolás

Eredeti csomagolásban szobahőmérsékleten (2–30 °C között) tárolandó.

Lejárati időn túl ne használja.

Ne fagyassza le a tesztkazettákat.

### Teszt jellemzők

Dirofilaria immitis antigén		ELISA		Teljes
		Pozitív	Negatív	
Fassisi CanDiro	Pozitív	32	0	32
	Negatív	2	21	23
Teljes		34	21	55

Szenzitivitás: 94,12%

Specificitás: 99%

Értékelő tanulmány 2008/2009

**FORGALMAZTA:**

Medicus Partner Kft.  
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 12.  
Tel.: 23/530-540  
[www.vetcentre.com](http://www.vetcentre.com)

